

Минимальные требования к пробам для серологической лаборатории

1. Транспортная тара: пробы должны доставляться в пластиковых пробирках типа эппендорф или аналогичных. Допускается использование вакуумных пробирок типа Вакутейнер объемом 6-8 мл.
2. Пробы должны доставляться в сумке-холодильнике или термо-контейнере с охлажденными термоэлементами.
3. Если доставка пробы производится не в день отбора, **то проба должна быть заморожена и доставлена в замороженном виде. Не допускается замораживать цельную кровь.**
4. Для птицы количество пробирок в одной пробе должно быть **не менее 18**. Рекомендуется отбирать 20-22 пробирки.
5. Объем сыворотки в каждой пробирке должен быть не менее:
 - 100 мкл для постановки иммуноферментного анализа (ИФА)
 - 150 мкл для выполнения реакции торможения гемагглютинации (РТГА).
 - не менее 300 мкл, если предполагается выполнение реакции и ИФА и РТГА.
 - **Рекомендуется отбирать сыворотки до заполнения конической части пробирки эппендорф**
6. Пробу должен сопровождать документ, в котором указывается:
 - заказчик, контактная информация (**обязательно: телефон с кодом города и электронная почта**) и контактное лицо;
 - объект испытаний (сыворотка крови птицы, сыворотка крови свиней и т.п.);
 - или, если это необходимо в целях сохранения конфиденциальности, тип и код пробы;
 - перечень показателей, по которым необходимо провести испытания;
 - дополнительная информация:
 - тип птицы;
 - возраст птицы;
 - номер птичника или корпуса;
 - дата отбора пробы и т.д.